


管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® V5

「パナビア® V5」で実現する

ワンランク上の補綴修復*

*当社従来品と比較して

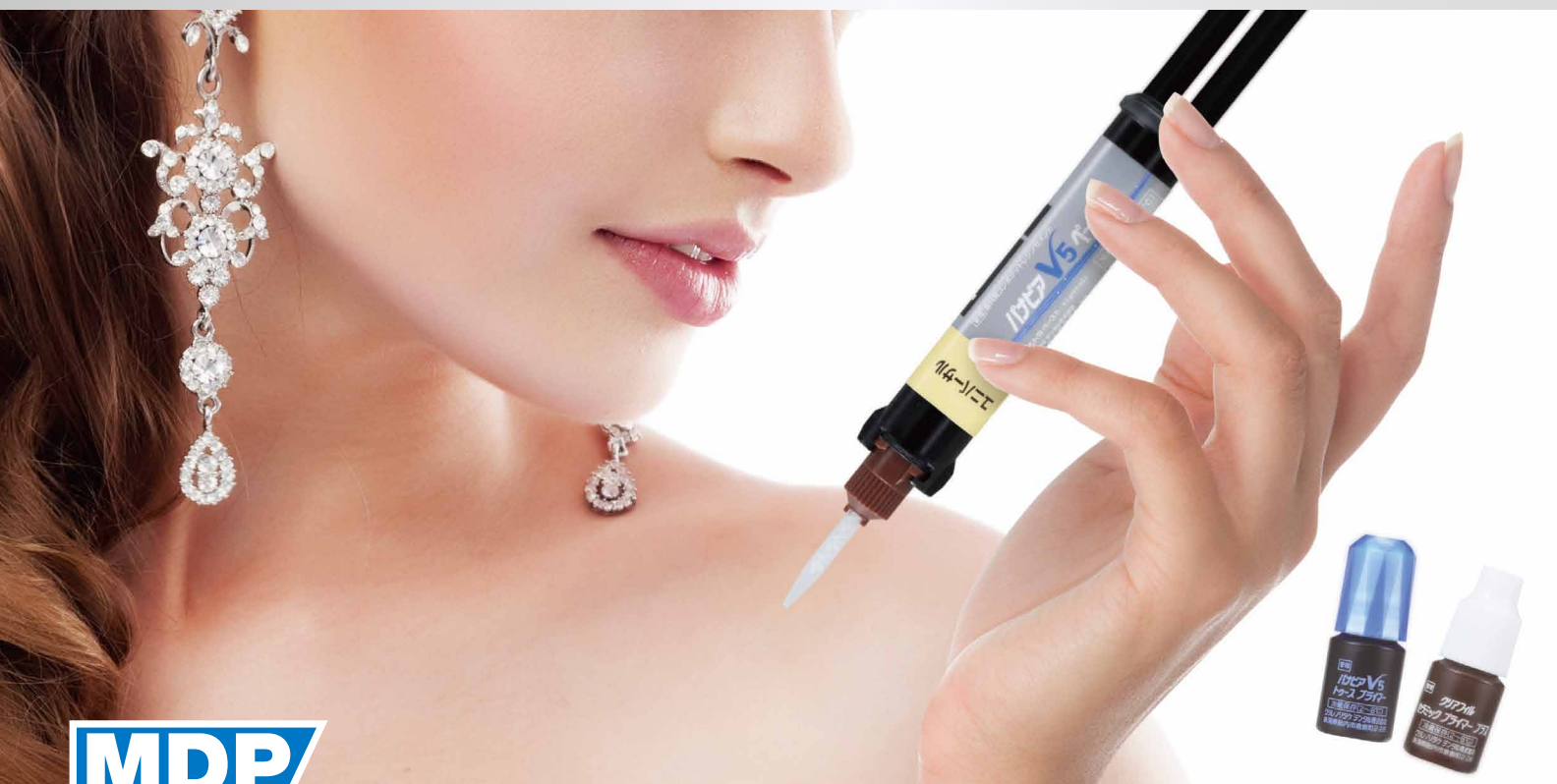


歯質接着性に優れ、
使いやすさを追求



「パナビア® F2.0」の3倍の象牙質接着を実現^{*1}

高活性な新規化学重合触媒^{*2}の採用により、優れた歯質接着性を実現しました。特に象牙質接着性は、当社従来品と比べて大幅に向上。^{*1}「パナビア® F2.0」の3倍の象牙質接着力を有します。

歯質への接着強さ (牛歯、引張、化学重合)

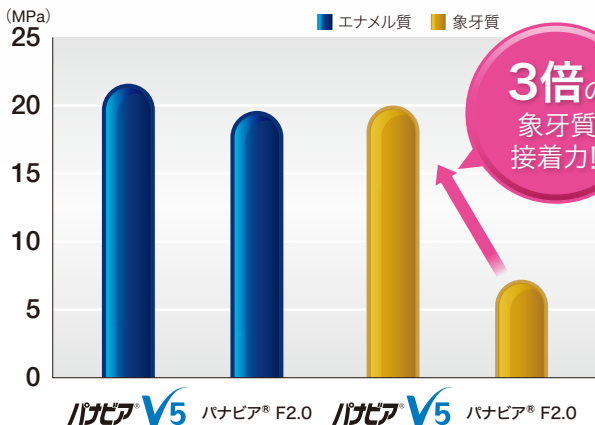

測定条件: 牛歯#1000研磨面、接着面積3mm²、化学硬化37°C水中に1日浸漬後、測定
測定装置: オートグラフ AG-100kN (島津製作所) クロスヘッドスピード: 2mm/min
クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。

化学重合のみで **高い接着力** を発揮


さらに、
象牙質接着力が高いため、
根管象牙質とポスト・コアの
接着にも性能を発揮します。



写真提供: 山手通り歯科 森田 誠 先生



各種補綴物への接着強さ (サーマルサイクル3,000回後)

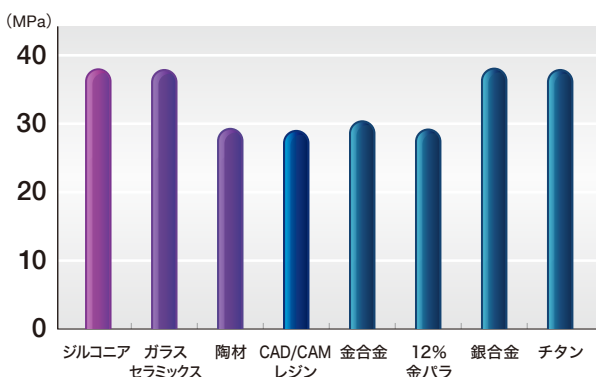

測定条件: サンドブラスト処理(シリコニア、金属、CAD/CAMレジン)、#1000研磨(陶材、ガラスセラミックス)、接着面積: 5mm²、接着体に本品適用後、「パナビア® V5ペースト」を塗布して圧接し、マージン部へベンキュア2000で2方向から10秒光照射
37°C水中に1日浸漬し、サーマルサイクル(4~60°C, 3000回)後、測定
測定装置: オートグラフ AG-100kN (島津製作所) クロスヘッドスピード: 1mm/min
クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。



^{*1} 牛歯象牙質に対する引張接着強さ(グラフ参照) ^{*2} 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

発売から30年

パナビア® V5」の誕生です。

シンプルな操作ステップ

〔使用用途1〕

クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着。
詳しくは添付文書をご確認下さい。

補綴物には、
これ1本!!



クリアフィル® セラミック プライマー プラス

陶材 シリカ系ガラスセラミックス
CAD/CAMレジン ジルコニア +金属

「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」は、シランカップリング剤に加え、リン酸エステルモノマー「MDP®」も含有することから、陶材、シリカ系ガラスセラミックス、CAD/CAMレジン、ジルコニア、金属の前処理材として有効です。

写真提供：高輪歯科 加藤 正治 先生

1 試適



トライイン ペースト

接着前の試適で色調確認が行えます。

2 補綴物の前処理



3 窩洞/支台歯の 処理



※パナビア® V5 トゥースプライマーの塗布には、付属のアプリケーターブラシでも使用可能です。

支台歯には、
（歯質、レジンコア、
メタルコア）
これ1本!!

パナビア® V5 トゥース プライマー

歯質 レジンコア メタルコア

新しい重合促進剤の採用により、
1液化を達成しました。

4 装着



余剰セメント除去のタイミングを選択できる!

5-a 光照射による方法

余剰セメントに3~5秒光照射※。半硬化した余剰セメントを探針等で除去。

※オペークの場合は、5-bの方法で除去してください。



または



5-b 拭き取り（小筆、ガーゼ等）

余剰セメントをガーゼ、小筆等で除去。マージン部に10秒光照射。

6 最終硬化

化学重合による
最終硬化は装着後

3分

※レジンコアの場合は、合着・植立から6分以上







色調安定性に優れた5色のセメントペースト

“アミンフリー”の新規化学重合触媒※2を導入。BPO-アミン系触媒を採用した当社従来製品と比較して、優れた色調安定性を発現します。

※2 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

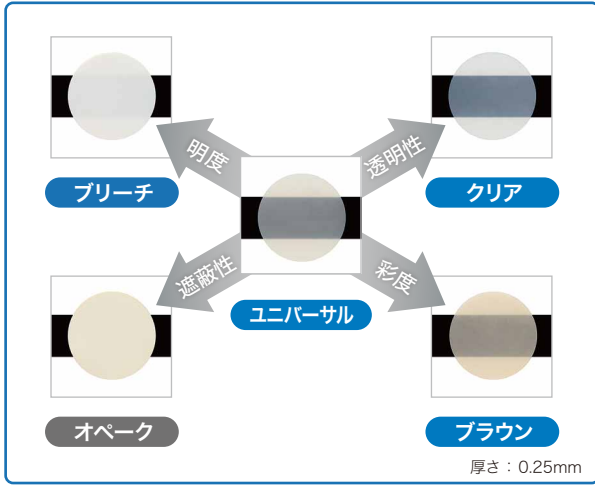

硬化物の色調安定性

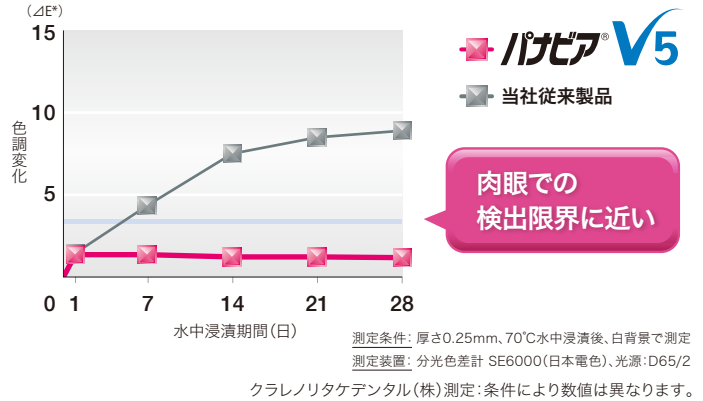

管理医療機器 歯科用セメントキット

パナビア® V5

医療機器認証番号：226ABBZX00106000



コンプリートキット

- メーカー希望小売価格 **57,000円** 243600
- ・パナビア® V5 ベースト(ユニバーサル)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 ベースト(クリア)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 ベースト(ブラウン)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 ベースト(ブリーチ)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 ベースト(オベーク)半量タイプ 4.2 g (2.4 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ユニバーサル) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トライイン ベースト(クリア) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ブラウン) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ブリーチ) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トライイン ベースト(オベーク) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL ×1本
 - ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL ×1本
 - ・K エッチャント シリンジ 3 mL ×1本
 - ・付属品：ミキシングチップ(含着用) 30個、ミキシングチップ(エンド用) 10個、ガイドチップ(エンド用細) 10個、コードルチップ(E) 20個、アプリケーターブラシ(ファイン<シルバー>) 50本、ティスポ小筆 ブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) ×1本、混和血(FPN) ×1個

スターターキット (ユニバーサル)

- メーカー希望小売価格 **23,000円** 243601
- ・パナビア® V5 ベースト(ユニバーサル) 8.1 g (4.6 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トライイン ベースト(ユニバーサル) 2.4 g (1.8 mL) ×1本
 - ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL ×1本
 - ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL ×1本
 - ・K エッチャント シリンジ 3 mL ×1本
 - ・付属品：ミキシングチップ(含着用) 15個、ミキシングチップ(エンド用) 5個、ガイドチップ(エンド用細) 5個、コードルチップ(E) 20個、アプリケーターブラシ(ファイン<シルバー>) 50本、ティスポ小筆 ブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) ×1本、混和血(FPN) ×1個



関連製品

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア® V5 ベースト

医療機器認証番号：226ABBZX00102000
(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オベーク)

- ・8.1 g (4.6 mL) ×1本
- ・ミキシングチップ(含着用) 20個

メーカー希望小売価格 各 **12,000円** 243611~243615

ミキシングチップ(含着用)

・20個

メーカー希望小売価格 **1,570円** 243626

ミキシングチップ(エンド用)

・20個

メーカー希望小売価格 **1,050円** 243627

ガイドチップ(エンド用細)

・20個

メーカー希望小売価格 **520円** 243628

管理医療機器 歯科用エッチング材

K エッチャント シリンジ

医療機器認証番号：226ABBZX00089000

- ・容量：3mL

メーカー希望小売価格 **3,000円** 243252

管理医療機器 歯科用色調適合確認材料

パナビア® V5 トライイン ベースト

医療機器認証番号：226ABBZX00103000
(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オベーク)

- ・トライインペースト 2.4 g (1.8 mL) ×1本

メーカー希望小売価格 各 **3,000円** 243621~243625



管理医療機器 歯面処理材
(歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料)

パナビア® V5 トゥース プライマー

医療機器認証番号：226ABBZX00104000

- ・容量：4mL

メーカー希望小売価格 **4,000円** 243635



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)

クリアフィル® セラミック プライマー プラス

医療機器認証番号：226ABBZX00105000

- ・容量：4mL

メーカー希望小売価格 **7,000円** 243637

●メーカー希望小売価格の後の6ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。●掲載商品のメーカー希望小売価格は2015年10月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。

●データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。●印刷のため実際の色調と異なる場合があります

●仕様及び外観は、製品改良のため予告無く変更することがありますので、予めご了承下さい。●ご使用に際しましては添付文書を必ずお読み下さい。

「パナビア® F2.0」 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00029000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

》クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922 月曜～金曜 10:00～17:00 www.kuraraynoritake.jp

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**
〒100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3(大手センタービル)
フリーダイヤル：0120-330-922

販売元 **株式会社モリタ**
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03)3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020
http://www.dental-plaza.com